


FlexFix – der OP-Assistent für Laparoskopie und Neurochirurgie

→ hält, → positioniert, → fixiert Endoskope, Kameras und Instrumente (z.B. Retraktoren aller Art) zuverlässig während Operationen. Das OP-Team wird spürbar entlastet.

Funktion – präzise und einfach

Durch Betätigen eines Druckluftfußschalters werden alle Gelenke des **FlexFix** beweglich. Der Haltearm kann nun leicht in die gewünschte Position – alle Ebenen – gebracht werden. Wird der Fußschalter losgelassen, werden die Gelenke von **FlexFix** arretiert. Das Kugelgelenk am Instrumentenhalter ermöglicht die präzise Feinjustierung.

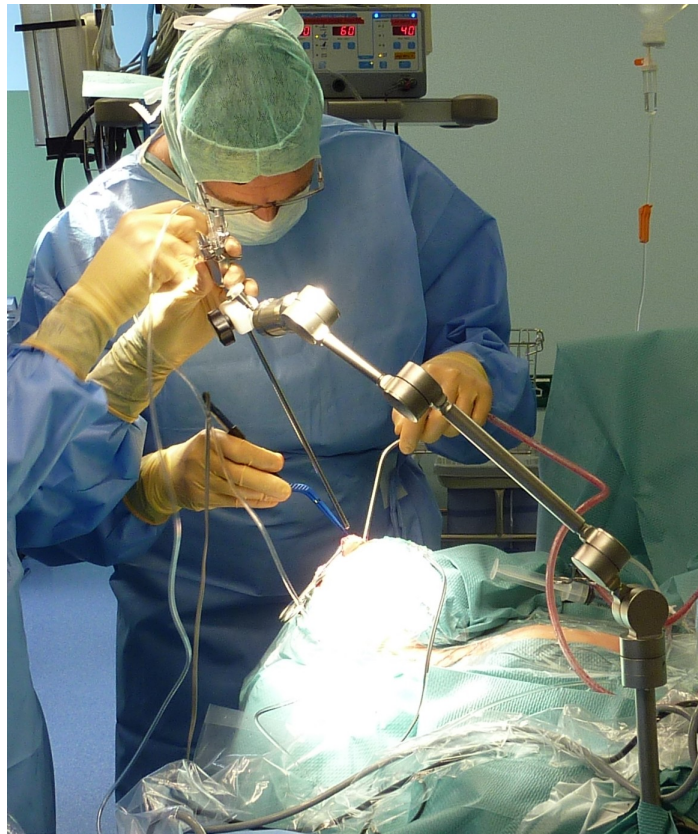

Erleichterung für den Operateur und das OP-Team

- ▶ Sehr präzises Positionieren möglich – einfach über einen Fußschalter.
- ▶ Nach dem Einstellen der Grundposition **mit nur einer Hand bedienbar**.
- ▶ Saubere und schnelle Instrumentenaufnahme durch Klammer oder Quickrelease.
- ▶ Ideal zum Halten von Endoskop oder Retraktoren → manuelles statisches Halten entfällt!
- ▶ Schlank und verstellbar in allen Ebenen → schafft Arbeitsraum am OP-Tisch.

Aufbau, Montage und Handling – schnell und flexibel

- ▶ **FlexFix** passt mit standardisierten Befestigungsklemmen an jeden OP-Tisch.
- ▶ Es können sowohl starre als auch flexible Haltesysteme für unterschiedliche Durchmesser eingesetzt werden. Klammer- oder Quickreleaseaufnahme ermöglichen den schnellen und sauberen Wechsel von Endoskopen, Kameras oder Instrumenten während der OP.
- ▶ Adapter nach individuellen Einsatzmodalitäten sind lieferbar.

Hygiene – problemlos und sicher

Der Gelenkarm ist aus Edelstahl 1.4301 gefertigt und pflegeleicht:

- ▶ Demontieren und waschen im RDA (Reinigung Desinfektion Automaten)
- ▶ Sterilisieren mit Dampf bei 134°C
- ▶ Bereitstellen in Normcontainern

Passive Sicherheit

Auch nach dem Trennen von der Druckluftversorgung bleibt **FlexFix** arretiert.

Produktvarianten

Die Anzahl der Gelenke sowie die Länge der einzelnen Gelenkelemente kann für den jeweiligen Anwendungszweck variieren. Gerne können wir diesbezüglich individuelle Wünsche berücksichtigen und **FlexFix** entsprechend anpassen.